



**BELILAB**  
LABORATOIRE  
DE BIOLOGIE  
MÉDICALE  
8 RUE GASTON  
DEFFERRE  
62400  
BETHUNE

## PROTOCOLE POUR SCOTCH TEST

Ref : A-FOR-SEC-015-version 05  
Version : 05  
Applicable le : 30-09-2015



## PROTOCOLE POUR SCOTCH TEST

### **INTERET :**

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'oxyures, fréquents chez les enfants et entraînant des démangeaisons et des troubles du sommeil.

### **PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT :**

A effectuer au lever avant la toilette et les selles.  
Décoller le scotch de son support (scotch transparent).

Appliquer le côté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.  
Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support.

Renouveler l'opération avec le second scotch.  
Replacer les 2 lames dans l'étui et l'acheminer au laboratoire dans les plus brefs délais.

Ne pas oublier de noter les nom et prénom sur l'étui SVP.